


Bactisan Wipe 2000 FP

scheda tecnica (rev.04/2018)

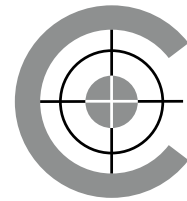

CHEMAX

TAKE-OFF IN QUALITY

Descrizione

Salviette in tessuto-non-tessuto, imbibite di soluzione disinfettante per la disinfezione e deterzione a freddo di dispositivi medici non invasivi in campo sanitario e laboratoristico.

Benefits

– **Dispositivo Medico Classe II° - Direttiva 93/42/CEE**

Applicazioni

Bactisan Wipe 2000 FP è indicato per la disinfezione rapida di Dispositivi medici non invasivi (classe IIA e classe I), strumentario medico-chirurgico, apparecchiature biomedicali, superfici, lettini medici, ambulanze, carrelli, maniglie, stetoscopi, materiali di podologia, manipoli odontoiatrici.

1. Aprire il barattolo ed estrarre una salvietta imbevuta di disinfettante
2. Dopo aver effettuato le normali operazioni preliminari di pulizia, strofinare la superficie e lo strumento, senza risciacquare né asciugare. Per una disinfezione di emergenza passare la salvietta sulle superfici e sui dispositivi medici prima dell'uso. Per l'eliminazione dei microrganismi patogeni (escluse le spore) lasciare che la soluzione agisca per 5-15 minuti e risciacquare con acqua sterile.
3. Richiudere bene il contenitore dopo l'uso al fine di evitare l'essiccazione delle salviette.

Spettro di azione

Disinfettante microbica ad ampio spettro d'azione, attivo a freddo sia su Gram positivi che su Gram negativi, batteri acido-resistenti. Attivo inoltre contro i virus, anche su quelli lipofili, gruppo al quale appartengono l'HIV, l'HBV, l'HCV ed altri. L'attività battericida e fungicida dell'associazione è stata sperimentalmente dimostrata secondo la procedura UNI EN 13697 e con i risultati ottenuti con un test simulante le reali condizioni d'uso (Relazioni sperimentali a cura del Prof. S. Martinotti: Scuola di (Relazioni sperimentali a cura del Prof. S. Martinotti: Scuola di Specializzazione di Patologia Clinica – Univ. di Chieti G. D'Annunzio).

Proprietà fisiche e chimiche

Aspetto e colore:	Salvietta bianca in Tessuto non Tessuto Viscosa/Cellulosa
Dimensione salvietta:	20 x 20 aperta
Soluzione imbibente:	pH 7,0 ± 0,5; peso specifico: 1,0 ± 0,05 g/ml

L'utilizzo delle salviette Bactisan Wipe 2000 FP non dispensa dal protocollo di lavaggio né sostituisce in alcun modo la sterilizzazione dove necessaria. Le analisi eseguite non hanno evidenziato alcuna incompatibilità con le membrane dello stetoscopio. Il prodotto è compatibile con la maggior parte dei materiali. Alcuni plexiglas e plastiche possono risultare sensibili all'alcool. Verificare nel manuale di istruzioni dei fornitori dei dispositivi medici, prima di utilizzare la salvietta. La salvietta non deve essere utilizzata su superfici che entrano in contatto con i prodotti alimentari. Non mescolare con altri prodotti. L'uso simultaneo o successivo di disinfettanti con altri componenti cationici deve essere evitato.

Stoccaggio: conservare il prodotto nella confezione originale in ambiente fresco, pulito ed asciutto, al riparo da elevate fonti di calore e non esposto a luce solare diretta. Il periodo di validità indicato (30 mesi) si riferisce al prodotto nel suo contenitore integro e correttamente conservato. Una volta aperta la confezione le salviette mantengono le loro caratteristiche fino ad esaurimento se conservate in modo opportuno, facendo sempre attenzione a chiudere il tappo salva freschezza.

Packaging

12 pz x 72 salviette



chemax srl - Aviation Products

via raibano, 39/E - 47853 Coriano (RN) - Italy

tel. +39 0541 660445 fax. +39 0541 650063

e-mail: info@chemax.it web: www.chemax.it

P. IVA 04212250403 REA 330674

